


Trasduttore di Flusso Wireless

Tecnologia basata SUL WEB

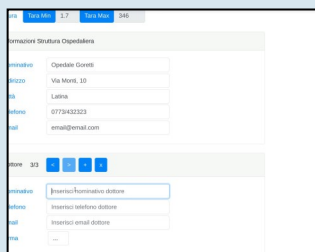

Computer integrato
Sistema Operativo
Linux Multi Tasking
possibilità oltre che
la visualizzazione
sul Display a 7"

Touch-Screen an-
che su PC desk Top
in remoto, Tablet ,
Smartphone e Pagi-
na Web tramite

collegamento diretto con WI-FI. Puoi monito-
rare in remoto dovunque tu ti trovi basta
accendere il proprio smartphone, tablet, o
PC Inoltre sono presenti nel software tutte
le procedure secondo lo standard I.C.S (In-
ternational continence society) inserimento
del referto conclusioni modalità di esecuzione
dell'esame e molto altro.

MEDICAL
EV.SERVICE ITALIA
EQUIPMENT



Portata massimo del tra-
sduttore 1 Litro. Il trasdut-
tore di Flusso ha alcune
funzioni speciali, quale la
taratura digitale che puo'
eseguire l'operatore senza
dover consultare un tecni-
co, il controllo del peso in
tempo reale per poter
avere sempre il trasduttore
con la perfetta taratura.

Trasduttore di Flusso :

Plastificato su struttura portante regolabile in altezza cavità' posi-
zionamento Beker da 1 Litro graduato e Porta imbuto. Elettronica
integrata con modulo di trasferimento Dati in modalita' wire-
less e batteria interna ricaricabile da 3,7V al lithio completo di
carica batteria 5V 2.A Il sistema può funzionare anche durante la
carica della batteria. Portata del segnale fino a 50-80 M dall'appa-
recchiatura salvo impedimenti dovuti alle strutture dell'ambiente
in cui viene installato. Antenna integrata nel dispositivo. Sedia
pieghevole con appoggia braccia regolabile in altezza per la min-


EV.SERVICE ITALIA SRL

Indirizzo ufficio Via Imbiani N° 2/D
40017 San Giovanni in Persiceto (Bologna)
Italy
Zona Industriale
Stabilimento Produzione Assistenza Tecnica
Tel.: + 39 51 728836
Posta elettronica: info@evserviceitalia.it
Web Site : www.evserviceitalia.org

MEDICAL
EV.SERVICE ITALIA
EQUIPMENT

Uroflussimetro Wireless
Flowline Plus Vers. Lite
Vers. 2.1a TOP DI GAMMA

*Tecnologia all'Avanguardia per aiutarVi
ad aiutare gli altri...!!*

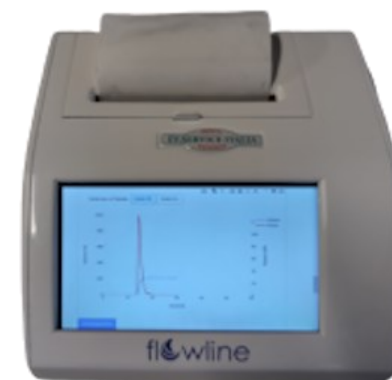

Per contatti immediati
tel + 39 51 728836

funzioni del sistema Flowline Lite

Sistema Computerizzato con S.O Linux

Sistema Flowline Lite può funzionare sia in modo **automatico che manuale**. L'operatore può programmare lo strumento a seconda delle proprie esigenze e non dovrà più intervenire sulla programmazione in quanto l'apparecchiatura memorizza l'ultimo profilo impostato. **In modo Manuale** si possono eseguire tutte le funzioni in modo sequenziale :

- 1) acquisizione del tracciato Uroflussimetrico
- 2) stop manuale in caso si ritenga di bloccare l'esame in qualsiasi momento sia in modalità manuale che in automatica
- 3) l'operatore può eseguire lo svuotamento del Beker e le operazioni di pulizia senza toccare alcun tasto del Flowline. L'apparecchiatura al termine del tempo impostato si posiziona in automatico in attesa del paziente successivo (Modalità automatica)
- 4) Inserimento dei dati del paziente fino alla patologia refertazione e altri dati secondo lo standard I.C.S
- 5) Memorizzazione dell'esame in automatico nella memoria interna del data base del sistema
- 6) Archivio degli esami dove l'operatore può recuperare gli esami effettuati e aggiornarli o ristamparli sulla stampante predefinita
- 7) Stampa del tracciato Uroflussimetrico la stampante stamperà il report sulla stampante integrata di tipo termico, a richiesta via usb o via cavo su esterna (Laser-Getto d'inchiostro)
- 8) Statistiche, nomogrammi e elaborazione dei tracciati , esportazione in PDF del Report , inserimento del logo e firma digitale di ogni utilizzatore dello strumento

LCD Touch-screen 7" COLORI A LED

RAM 4-8

GB MICRO SD 128 GB USCITE UNA USB

WI-FI BLUETOOTH

Stampante integrata Termica da 114 mm

Alimentatore Medica 24V 2.5A

Parametri del Flowline Lite.

Volume Svuotato

(da 0 a 1000 ml)

Flusso Massimo

(da 0 a 50 ml/sec regolabile da tastiera)

possibilità di cambiare la scala sia del Volume che del Flusso per avere maggiore chiarezza dei tracciati e vedere i particolari dell'andamento delle curve)

Flusso Medio

Volume residuo (si aggiunge manualmente)

Tempo al Flusso Massimo

(espresso in secondi)

Tempo di Svuotamento

(espresso in secondi)

Tempo di Flusso

(espresso in secondi)

Diagnosi secondo Siroky-liverpool

(sia al flusso massimo che al flusso medio)

Scale Flusso/Volume automatiche o da impostare manualmente

Inserimento marker elaborazioni tracciati

Inserimento dei dati del paziente tramite tastiera touch o esterna sia a cavo USB o wireless


Inserimento della patologia

Altre funzioni...

Inserimento tramite tastiera dei Dati del paziente e dell'operatore sia virtuale che esterna Controllo funzionale delle periferiche, in particolare monitorare la taratura della cella di carico in tempo reale, per avere sempre un corretto risultato dell'esame senza dover interpellare alcun centro di assistenza. Funzione del controllo della Post- Minzione: tramite la tastiera si può inserire il tempo in cui la macchina si ferma in modo autonomo per avere una precisione maggiore sul tempo della minzione e lasciare il paziente in piena autonomia. Molte altre funzioni del software.....



Memoria interna per immagazzinare i dati dei pazienti

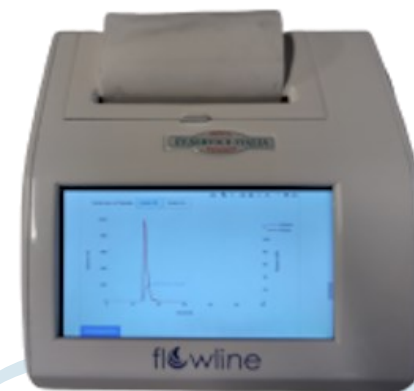

EV.SERVICE ITALIA SRL

Indirizzo ufficio Via Imbiani N° 2/D
40017 San Giovanni in Persiceto (Bologna) Italy
Zona Industriale
Stabilimento Produzione Assistenza Tecnica
Tel.: + 39 51 728836
Posta elettronica: info@evserviceitalia.it
Web Site : www.evserviceitalia.org
www.evserviceitalia.eu