


Trasduttore di Flusso Wireless

COLLEGAMENTO diretto tra Pc e il Trasduttore tramite Flowline Connect

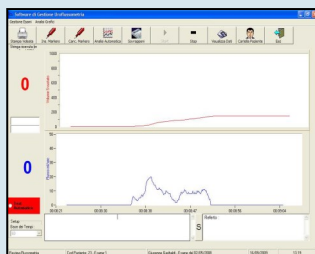

Report Dati Flussometria

Parametro	Valore	Unità
Volume (ml)	20.00	ml
Volume (L)	0.02	L
Volume (ml/kg)	0.02	ml/kg
Volume (L/kg)	0.002	L/kg
Volume (ml/100g)	0.02	ml/100g
Volume (L/100g)	0.002	L/100g
Volume (ml/100g)	0.02	ml/100g
Volume (L/100g)	0.002	L/100g
Volume (ml/100g)	0.02	ml/100g
Volume (L/100g)	0.002	L/100g

Collegamento al Personal Computer tramite tecnologia Flowline Connect. Puoi spegnere il

Flowline I4 e utilizzare direttamente il software per la gestione dell'esame Flussometrico e la sua archiviazione nel data base del Sistema Stampa del report in formato A4 (personalizzabile) direttamente da Pc.

Software EVConnect Versione Base

Il Sistema Flowline Connect è Opzionale quotato a parte



Portata massima del trasduttore 1 Litro. Il trasduttore di Flusso ha alcune funzioni speciali, quale la taratura digitale che può eseguire l'operatore senza dover consultare un tecnico, il controllo del peso in tempo reale per poter avere sempre il trasduttore con la perfetta taratura.

Trasduttore di Flusso : Pastificato su struttura portante regolabile in altezza cavità posizionamento Beker da 1 Litro graduato e Porta imbuto. Elettronica integrata con modulo di trasferimento Dati in modalità wireless e batteria interna al li-thio ricaricabile da 3,7V. Portata del segnale fino a 50-80 M dall'apparecchiatura salvo impedimenti dovuti alle strutture dell'ambiente in cui viene installato. Ricevitore integrato nel dispositivo. Attacco con connettore a Jek per ingresso alimentazione da 5V per ricarica della batteria, il trasduttore funziona normalmente anche durante la ricarica senza perdere nessun esame.

EV.SERVICE ITALIA SRL

Indirizzo ufficio Via Imbiani 2/D
40017 San Giovanni in Persiceto
Bologna Italy
Zona Industriale
Stabilimento Produzione Assistenza Tecnica
Tel.: + 39 51 728836
Fax: + 39 51 7417254
Posta elettronica: info@evserviceitalia.it



Uroflussimetro Wireless Flowline I4 Vers. 2.10

Tecnologia all'Avanguardia per aiutarVi ad aiutare gli altri...!!



**Per contatti immediati
tel + 39 51 728836**

funzioni del sistema Flowline 2.10

Sistema Flowline 14 puo' funzionare sia in modo **automatico che manuale**. L'operatore puo' programmare lo strumento a seconda delle proprie esigenze e non dovra' piu' intervenire sulla programmazione in quanto l'apparecchiatura memorizza l'ultimo profilo impostato. **In modo Manuale** si possono eseguire tutte le funzioni in modo sequenziale :

- 1) acquisizione del tracciato Uroflussimetrico
- 2) Lo stop manuale in caso si ritenga di eseguirlo in modo manuale o in automatico se viene impostato il parametro della Post Minzione, il quale verrà conteggiato in automatico visualizzando sul Display il tempo trascorso alla fine del quale l'apparecchiatura si fermerà automaticamente
- 3) Impostazione della Data e dell'Ora dell'esame che cambieranno automaticamente grazie all'orologio interno al sistema
- 4) Programmazione del Tempo di Fine Test per dare la possibilità all'operatore di eseguire lo svuotamento del Beker e le operazioni di pulizia senza toccare alcun tasto del Flowline. L'apparecchiatura al termine del tempo impostato si posizionerà in automatico in attesa del paziente successivo (Modalità automatica)
- 5) Inserimento dei dati del paziente fino alla patologia (in modalità manuale
- 6) Memorizzazione dell'esame in automatico nella memoria interna del Flowline
- 7) Archivio degli esami dove l'operatore puo' recuperare gli esami effettuati e ristamparli o sulla stampante incorporata o su PC.
- 8) Stampa in Tempo reale durante l'acquisizione del tracciato Uroflussimetrico la stampante stamperà il tracciato in tempo reale
- 9) Possibilità di scelta sul Tipo di Stampa : **Volume e Flusso o Solo Flusso**
- 10) A scelta dell'Operatore si possono avere 2 stampe una da trattenere per il proprio archivio Clinico l'altra da consegnare al paziente
- 11) Si possono ottenere i tracciati in varie modalità : Standard Medio Compresso, Stretto

Parametri del Flowline 14 W.

Volume Svuotato

(da 0 a 1000 ml)

Flusso Massimo

(da 0 a 50 ml/sec regolabile da tastiera)

possibilità di cambiare la scala sia del Volume che del Flusso per avere maggiore chiarezza dei tracciati e vedere i particolari dell'andamento delle curve)

Flusso Medio

Volume residuo (si aggiunge manualmente)

Tempo al Flusso Massimo

(espresso in secondi)

Tempo di Svuotamento

(espresso in secondi)

Tempo di Flusso

(espresso in secondi)

Diagnosi secondo Siroky

(Diagnosi del grado di Ostruzione Dubbio-ostruito-non ostruito)

Riconoscimento sonoro degli artefatti

Impostazione Massimo Flusso

Inserimento della Data e dell'ora dell'esame

Inserimento dei dati del paziente tramite tastiera a membrana

Inserimento della patologia

Altre funzioni...

Inserimento tramite tastiera dei Dati del paziente e dell'operatore (Modalità Manuale) Controllo funzionale delle periferiche, in particolare monitorare la taratura della cella di carico in tempo reale, per avere sempre un corretto risultato dell'esame senza dover interpellare alcun centro di assistenza. Inserimento del Volume residuo in aggiunta dei parametri calcolati dallo strumento. Funzione del controllo della Post-Minzione: tramite la tastiera si può inserire il tempo in cui la macchina si ferma in modo autonomo per avere una precisione maggiore sul tempo della minzione e lasciare il paziente in piena autonomia. (Modalità Automatica).....



.....Stampa su Stampante termica integrata.
L'operatore può decidere quando e come stampare il Test Flussometrico.

Memoria interna per immagazzinare i dati dei pazienti



EV.SERVICE ITALIA SRL

Indirizzo ufficio Via Imbiani 2/D
40017 San Giovanni in Persiceto
Bologna Italy
Zona Industriale
Stabilimento Produzione Assistenza Tecnica
Tel.: + 39 51 728836
Fax: + 39 51 7417254
Posta elettronica: info@evserviceitalia.it
Web Site : www.evserviceitalia.org